

Pokrętko włączania/
wyłączania i regula-
cji mocy

Urządzenie Pro

Kabel zasilający

Element filtrujący (zapobiega przedostawaniu się drobnych elementów do wnętrza urządzenia)

Element łączący

Wężyk


Głowica Colibri

Obudowa głowicy
bez złącza

Rurka ssąca z kolnierzem

Obudowa głowicy
ze złączem

Końcówka do nosa

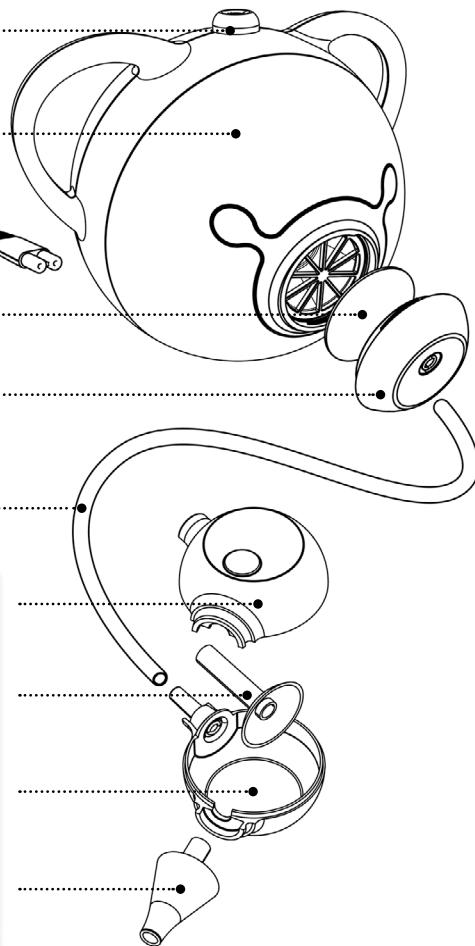

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przedmowa

Szanowny Kliencie!
Gratulujemy zakupu produkowanego przez nas aspiratora do nosa Nosiboo Pro wyróżnionego nagrodami KSCI, PTPA, Red Dot Design i German Design.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji użytkownika, aby uzyskać najlepszą wydajność aspiratora do nosa.

Spis treści

1. Zawartość opakowania
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Użycie
4. Przed użyciem
5. Używanie urządzenia
6. Czyszczenie
7. Przechowywanie i konserwacja
8. Rozwiązywanie problemów
9. Ważne informacje o zakłóceniach elektromagnetycznych
10. Wpływ na środowisko
11. Dane techniczne
12. Akcesoria, części zamienne



Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi!

CE 2409



Aspirator elektryczny Nosiboo Pro jest urządzeniem medycznym. Po zakupie jesteście uprawniony/a do zwrotu tylko wtedy, gdy urządzenie nie było używane, nie jest uszkodzone, a folia ochronna na głowicy Colibri i końcówce do nosa nie została naruszona!

1. Zawartość opakowania



Nosiboo Pro



Wężyk



Głowica Colibri +
Końcówka do nosa
dla noworodków



Standardowa koń-
cówka do nosa



Kabel zasilający



Szczoteczka

ATTRACT Kft. jest producentem wyrobów medycznych z certyfikatem ISO 13485. Ten produkt to wyrób dziedziczny (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa



Zastosowane części typu BF (zwiększona ochrona przed porażeniem elektrycznym)



Podwójna izolacja



Urządzenie medyczne klasy IIa



Nazwa i adres producenta



Przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Przeczytaj Instrukcję obsługi online



Tylko do użytku domowego



Numer artykułu



Numer seryjny



GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej (UDI-DI)



Numer partii

IP21

Obudowa chroni przed dostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych o wielkości powyżej 12,5 mm, nie chroni jednak przed przenikaniem cieczy.



Przechowuj w suchym miejscu!



Ostrożnie!



Uwaga!



Tak rób!



Tak nie rób!



Odpady elektryczne i elektroniczne segreguj oddzielnie!

Ogólne korzystanie



OSTRZEŻENIE



Używaj tylko zgodnie z zaleceniami! Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby pełnoletnie.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. TO NIE JEST ZABAWKA! (Kabel zasilający może łatwo owinąć się wokół szyi dziecka.)

Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci.

Nie używaj urządzenia w łazience lub innym wilgotnym, mokrym otoczeniu.

Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Podczas używania aspiratora nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia.

Przez te otwory z urządzenia wydostaje się gorące powietrze.

Nie używaj aspiratora do nosa do płukania nosa!



POUCZENIE

W czasie użycia urządzenie powinno znajdować się na płaskiej powierzchni w stabilnej pozycji.

Podczas używania punkt złączenia głowicy Colibri i wężyka powinien być skierowany w dół.

Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie przekręcając pokrętkę. Nie wyłączaj urządzenia przez odłączenie kabla zasilającego!

Zawsze dokładnie wyczyść głowicę Colibri po użyciu (patrz: rozdział „Czyszczenie”).

Przeczytaj i postępuj zgodnie z rozdziałem „Ważne informacje o zakłóceniach elektromagnetycznych”.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z rozdziałem „Wpływ na środowisko” jeśli chcesz zutylizować urządzenie lub którąkolwiek z jego części.



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa dzieci.

Skonsultuj z lekarzem, kiedy i jak często należy czyścić nos Twojego dziecka, szczególnie w przypadku, gdy pojawia się zaczerwienienie na skórze nosa.

Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio połączone.

Upewnij się, że obudowa, wężyk i głowica Colibri nie są uszkodzone lub pęknięte.



Przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli do wężyka dostanie się wydzielina z nosa lub sól fizjologiczna. Odłącz urządzenie z sieci, opróżnij głowicę Colibri, wyczyść i osusz głowicę Colibri oraz wężyk. Sprawdź stan elementu filtrującego i wymień go, jeśli jest mokry lub zatkany.

Sprawdź, czy po czyszczeniu umieściłeś/aś rurkę ssącą z kółkiem w głowicy Colibri.



Nie wkładaj końcówki przeznaczonej do nosa do ust lub ucha dziecka.

Nie wciskaj końcówki do nosa ani nie wkładaj jej zbyt głęboko do nozdrza.

Nie dociskaj końcówki do wewnętrznej strony nosa.

Nie używaj urządzenia, jeśli wystąpią objawy bólu nosa, zapalenia lub krwawienia z nosa. W przypadku wystąpienia bólu lub krwawienia należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.



Nie używaj urządzenia, jeśli wężyk lub głowica Colibri są uszkodzone. Wymień uszkodzoną część. (Lista części zamiennych znajduje się w rozdziale „Akcesoria, części zamienne”).

Nie należy używać głowicy Colibri i urządzenia bez rurki ssącej z kółkiem.

Nie używaj więcej niż łyżeczki soli fizjologicznej. Nadmiar płynu może dostać się do wężyka i uszkodzić urządzenie.

Urządzenia nie można stosować w środowisku bogatym w tlen i w praktyce klinicznej. Ten wyrób medyczny służy wyłącznie do użytku domowego.

Nie podłączaj głowicy Colibri do innych urządzeń.

Nie odłączaj urządzenia od gniazdka, dopóki całkowicie się nie zatrzyma.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie



Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem.



Używanie uszkodzonego kabla zasilającego może spowodować zwarcie (a w rezultacie pożar).

Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła (np. pieca, kaloryfera, konwektora), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia izolacji.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem wyłącz urządzenie i chwytając za wtyczkę wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie zginaj kabla zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając kabel z gniazdka! Uszkodzony kabel zasilający może spowodować porażenie prądem.



Nie wykręcaj śrub mocujących z obudowy urządzenia! Nie przerabiaj urządzenia w żadnym innym celu!

Zgięty, uszkodzony, zużyty, postrzępiony lub mający za sobą zwarcie elektryczne kabel zasilający może spowodować pożar instalacji elektrycznej, więc nie używaj go!

Nie pozostawiaj zdemontowanych części głowicy Colibri w pobliżu dzieci. Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci.

Nie myj obudowy urządzenia i kabla zasilającego w wodzie lub innych płynach. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Może to prowadzić do porażenia prądem lub awarii.



Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed kolejnym użyciem.



Sprawdź, czy po czyszczeniu umieściłeś/aś rurkę ssącą z kołnierzem w głowicy Colibri.

Kiedy nie korzystasz z urządzenia, zawsze wyciągaj kabel z gniazdka sieciowego chwytając za wtyczkę.

Aby uniknąć uszkodzenia, nie wystawiaj elementu łączącego na działanie wysokich temperatur.



Do czyszczenia części nie używaj zmywarki, wrzącej wody, kuchenki mikrofalowej, generatora pary ani sterylizatora do butelek, ponieważ części mogą zdeformować się pod wpływem ciepła!

Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.

Zasilanie



Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem wyłącz urządzenie i chwytając za wtyczkę wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.



W przypadku nieoczekiwanej awarii lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka!

Upewnij się, że używasz urządzenia tylko w sieci 230 V 50 Hz, zasilanej prądem przemiennym.



Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa urządzenia lub kabel zasilający są uszkodzone lub uszkodzone.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie zginaj kabla zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając kabel z gniazdka! Uszkodzony kabel zasilający może spowodować porażenie prądem.



Kiedy nie korzystasz z urządzenia, zawsze wyciągaj kabel z gniazdka sieciowego chwytając za wtyczkę.



Nie odłączaj urządzenia od gniazdka, dopóki całkowicie się nie zatrzyma.

3. Użycie

Aspirator do nosa Nosiboo Pro jest przeznaczony do usuwania wydzieliny z nosa dziecka.

Głowica Colibri ma opatentowaną konstrukcję, która nie tylko zapobiega przedostawaniu się wydzieliny do obudowy urządzenia, ale również ułatwia czyszczenie głowicy, usprawniając w ten sposób codzienne korzystanie z aspiratora do nosa.

Zamierzone przeznaczenie:

- * zapewnienie niemowlętom swobodnego oddychania przez nos,
- * łagodzenie objawów przeziębienia w dzieciństwie poprzez odsysanie wydzieliny z nosa,
- * łagodzenie objawów podobnych do alergii w dzieciństwie poprzez usunięcie wydzieliny z nosa.

Nie używaj urządzenia:

- * jeśli dziecko cierpi na hemofilię,
- * jeśli u dziecka często występuje krwawienie nosa,
- * jeśli dziecko przyjmuje leki rozrzedzające krew,
- * w przypadku wad wrodzonych (np. rozszczep podniebienia).



Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby pełnoletnie.



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa dzieci.



Urządzenie nie jest irygatorem do płukania nosa! Nie używaj dużej ilości płynu podczas oczyszczania nosa! Głowica Colibri może pomieścić ok. łyżeczkę (5 ml) rozcieńczonego płynu.

4. Przed użyciem

1. Zdemontuj głowicę Colibri, a następnie wyczyść i wysusz jej części!



Części głowicy Colibri:




Obudowa głowicy
ze złączem



Obudowa głowicy
bez złącza




Końcówka
do nosa

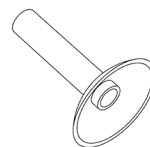


Rurka ssąca
z kołnierzem


2. Złóż głowę Colibri!

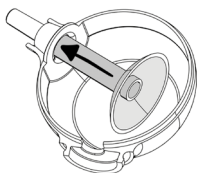


a) Wciśnij rurkę ssącą
z kołnierzem do
połowy obudowy
głowicy posiadającej
złącze.

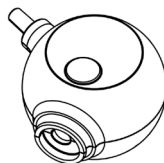

b) Umieść obudowę
głowicy bez złącza we
właściwej pozycji.

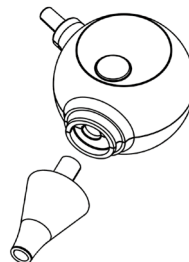


c) Wciśnij końcówkę do
nosa w odpowiednie
miejsce.

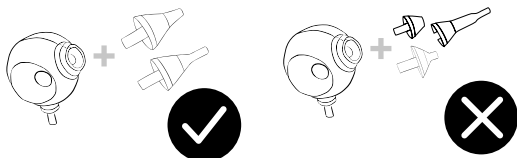


Używaj oryginalnych części Nosiboo!
Nasze aspiratory do nosa działają skutecznie tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami Nosiboo.

3. Podłącz głowicę Colibri do urządzenia.

- Podłącz jeden koniec wężyka do głowicy Colibri.
- Podłącz wolny koniec wężyka do obudowy urządzenia.

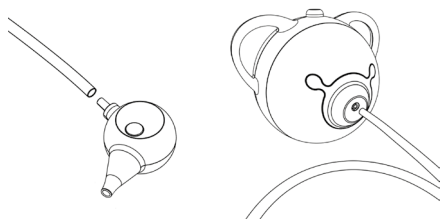

4. Podłącz kabel zasilający do urządzenia.

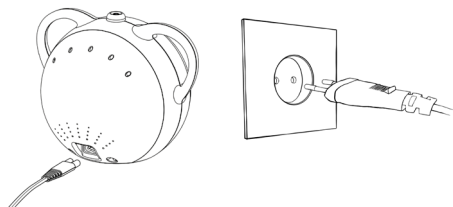

Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka ściennego 230 V 50 Hz.

5. Urządzenie jest gotowe do użycia.



Urządzenie można podłączyć do sieci i odłączyć od niej tylko wtedy, gdy pokrętko znajduje się w pozycji OFF.

Upewnij się, że używasz urządzenia tylko w sieci 230 V 50 Hz, zasilanej prądem przemiennym. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem lub pożar.



Wyczyść części głowicy Colibri przed każdym użyciem.


Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche i czyste przed użyciem.




Nie należy używać głowicy Colibri i urządzenia bez rurki ssącej z kołnierzem.

5. Używanie urządzenia

Nie zasysaj wody za pomocą urządzenia!

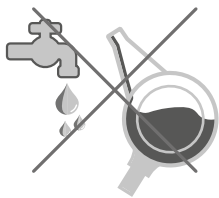

Nie używaj aspiratora do nosa do płukania nosa!

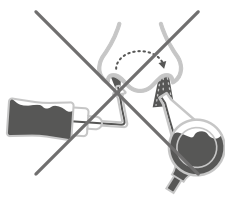

Zasysanie wody za pomocą elektrycznego aspiratora do nosa Nasiboo spowoduje utratę gwarancji.

1. Urządzenie jest gotowe do użycia.

2. Włącz urządzenie, obracając pokrętkę.



Urządzenie można podłączyć do sieci i odłączyć od niej tylko wtedy, gdy pokrętkę znajduje się w pozycji OFF.

UWAGA: Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane. Po całkowitym zatrzymaniu się silnika urządzenie można uruchomić ponownie.



3. Wybierz odpowiednią siłę ssania.



niskie ustawienie dla noworodków

średnie ustawienie dla niemowląt

wysokie ustawienie dla małych dzieci i przedszkolaków

RADA: Jeśli wydzielina jest rzadka, możesz używać urządzenia na niższym ustawieniu. Jeśli jest gęsta, możesz korzystać z urządzenia na wyższym poziomie niż zwykle.

4. Trzymaj dziecko w stabilnej pozycji.

Posadź dziecko na kolanach, przytrzymaj je w ramionach lub posadź w pozycji wyprostowanej z poduszką podpierającą plecy. Możesz również umieścić dziecko w bujanym fotelu lub nosidełku.

5. Włóż czystą, suchą końcówkę do nozdrza dziecka.

W przypadku noworodków wystarczy przyłożyć koniec końcówki do nozdrza. Podczas używania punkt złączenia głowicy Colibri i wężyka powinien być skierowany w dół.

UWAGA: Jeśli błona śluzowa nosa jest spuchnięta lub nozdrza są zatkane, sięgnij po roztwór odblokowujący zatkany nos lub zastosuj spray do nosa na 30 minut przed użyciem aspiratora.

6. Delikatnie poruszaj czubkiem końcówki wokół nozdrza, tak, aby dotrzeć do wszystkich jego zakamarków.



UWAGA: Podczas korzystania z aspiratora nie zakrywaj ani nie blokuj drugiego nozdrza.



Końcówka do nosa dla noworodków: 0-6 miesięcy (wiek dziecka)



Standardowa końcówka do nosa: 6 miesięcy i więcej



Zalecany czas trwania bezpośredniego odsysania wydzieliny z nosa to 10 sekund na nozdrze.

Roztwór fizjologiczny pomoże rozrzedzić wysuszone i bardzo gęste śluz w nosie. Po zastosowaniu roztworu odczekaj kilka minut aż wydzielina wycieknie z nosa, wytrzyj ją np. chusteczką i dopiero wtedy użyj aspiratora do nosa.



Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy używać więcej niż jednej łyżeczki roztworu na raz. Głowica Colibri może pomieścić ok. łyżeczkę (5 ml) rozcieńczonego płynu.

Urządzenie nie jest irygatorem do płukania nosa!



Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby pełnoletnie.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. TO NIE JEST ZABAWKA!



Podczas używania aspiratora nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia. Przez te otwory z urządzenia wydostaje się gorące powietrze.

Nie używaj urządzenia w łazience lub innym wilgotnym, mokrym otoczeniu.

Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami!

Nie zginaj kabla zasilającego w czasie używania lub przechowywania urządzenia!

7. Po użyciu wyłącz urządzenie przekręcając pokrętkę.



Urządzenie można podłączyć do sieci i odłączyć od niej tylko wtedy, gdy pokrętkę znajduje się w pozycji OFF.

UWAGA: Zawsze wyłączaj urządzenie po użyciu.

WSKAZÓWKA: Aspiratora do nosa Nosiboo Pro można używać kilka razy dziennie. Zaleca się oczyszczanie przewodów nosowych dziecka przed snem i karmieniem, aby mogło swobodnie oddychać.

UWAGA: Skonsultuj się z lekarzem w sprawie stosowania kropli do nosa lub innych preparatów!



Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche i czyste przed użyciem.

Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie przekręcając pokrętkę. Nie wyłączaj urządzenia przez odłączenie kabla zasilającego!

W czasie użycia urządzenie powinno znajdować się na płaskiej powierzchni w stabilnej pozycji.




Nie odłączaj urządzenia od gniazdka, dopóki całkowicie się nie zatrzyma.

Nie należy używać głowicy Colibri i urządzenia bez rurki ssącej z kołnierzem.

Nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go na miękkiej powierzchni utrudniającej wentylację (sofa, poduszka, pościel itp.)

6. Czyszczenie


1. Odłącz wężyk i końcówkę, a następnie zdemontuj głowicę Colibri.

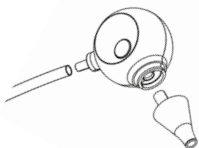


2. Umyj rurkę ssącą z kotłowniem, końcówkę do nosa i elementy głowicy Colibri letnią wodą z płynem do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia.




Użyj szczoteczki do czyszczenia końcówki do nosa.

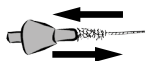

3. Wytrzyj obudowę urządzenia suchą, miękką ściereczką; nie używaj płynów, środków czyszczących ani chemikaliów.

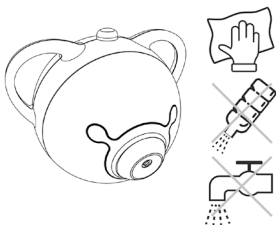

4. W razie potrzeby wytrzyj wężyk szmatką.

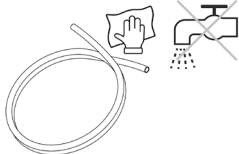

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem wyłącz urządzenie i chwytając za wtyczkę wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.



Nie myj obudowy urządzenia i kabla zasilającego w wodzie lub innych płynach. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Może to prowadzić do porażenia prądem lub awarii.

Nie myj wężyka.



Po użyciu dokładnie wyczyść głowicę Colibri.

Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche i czyste przed użyciem.

Jeśli z powodu niewłaściwego używania urządzenia do wężyka dostanie się płyn, upewnij się, że przed kolejnym użyciem część ta całkowicie wyschła.



Nie wykręcaj śrub mocujących z obudowy urządzenia! Nie przerabiaj urządzenia w żadnym innym celu!

Aby uniknąć uszkodzeń, upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie ciepła.

Do czyszczenia części nie używaj zmywarki, wrzącej wody, kuchenki mikrofalowej, generatora pary ani sterylizatora do butelek, ponieważ części mogą zdeformować się pod wpływem ciepła!

Nie używaj płynów, detergentów ani chemikaliów do czyszczenia obudowy urządzenia i wężyka!


7. Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie

1. Wyciągnij kabel z gniazdka dopiero po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.

UWAGA: Po wyłączeniu urządzenia, chwytając za wtyczkę, odłącz kabel zasilający z gniazdka i urządzenia.

2. Odłącz wąż od urządzenia i głowicy Colibri.

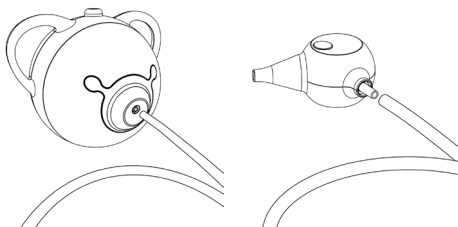

3. Przechowuj urządzenie w miejscu zamkniętym, zabezpieczonym przed kurzem i innymi uszkodzeniami (np. w szafie)!

UWAGA: Nie trzymaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.

Konserwacja

Specjalny element filtrujący pod elementem łączącym zapobiega przedostawaniu się dobrych elementów i kurzu do urządzenia. Jeśli wydajność urządzenia spada, sprawdź element filtrujący. Jeśli jest mocno zabrudzony lub zatkaany, wymień go. (Listę części zamiennych można znaleźć w rozdziale „Akcesoria, części zamienne”).



Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem

Trzymaj kabel zasilający z dala od źródeł ciepła



Nie pozostawiaj zdemontowanych części głowicy Colibri w pobliżu dzieci. Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie zginaj kabla zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając kabel z gniazdka! Uszkodzony kabel zasilający może spowodować porażenie prądem.

Nie owijaj kabla sieciowego wokół urządzenia.

Uszkodzony kabel może spowodować pożar elektryczny!



Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche i czyste przed użyciem.

Przechowuj urządzenie w czystym, chłodnym miejscu. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Propozycja rozwiązania
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest połączone do prądu.	Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego.
Zmniejszyła się moc ssania urządzenia.	Końcówka do nosa jest zatkana lub głowica Colibri została nieprawidłowo zamontowana.	Zdemontuj i wyczyść głowicę Colibri. Po wyschnięciu złóż części głowicy Colibri zgodnie z Instrukcją obsługi.
Zmniejszyła się moc ssania urządzenia.	Element filtrujący jest zatkany.	Wymień element filtrujący zgodnie z rozdziałem „Przechowywanie i konserwacja” w Instrukcji obsługi.
Ciecz lub wydzielina dostała się do wężyka.	Głowa Colibri nie była trzymana we właściwej pozycji.	Wyłącz urządzenie, a następnie wyczyść i osusz głowicę Colibri i wężyk. Sprawdź stan elementu filtrującego i wymień go w razie potrzeby.
Ciecz lub wydzielina dostała się do wężyka.	Miejsce podłączenia wężyka nie było skierowane w dół.	Wyłącz urządzenie, a następnie wyczyść i osusz głowicę Colibri i wężyk. Sprawdź stan elementu filtrującego i wymień go w razie potrzeby.
Ciecz lub wydzielina dostała się do wężyka.	Użyto zbyt dużo soli fizjologicznej.	Zmniejsz ilość roztworu soli do mniej niż łyżeczki (5 ml). Wyłącz urządzenie, a następnie wyczyść i osusz głowicę Colibri i wężyk. Sprawdź stan elementu filtrującego i wymień go w razie potrzeby.

9. Ważne informacje o zakłóceniach elektromagnetycznych

Domowe urządzenia do sieci bezprzewodowej, telefony komórkowe i telefony bezprzewodowe mogą wpływać na działanie niektórych urządzeń medycznych z powodu zakłóceń elektromagnetycznych między urządzeniami. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą powodować szkodliwe zakłócenia w działaniu niektórych urządzeń medycznych, powodując zagrożenie. Zalecane jest zachowanie minimalnej 5-metrowej odległości pomiędzy urządzeniami.

Z wyżej wymienionych powodów nie należy dopuścić do wystąpienia zakłóceń między urządzeniami medycznymi a innym sprzętem. Nie używaj w pobliżu urządzeń emitujących promieniowanie o dużej mocy.

Aspirator do nosa Nosiboo Pro jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym kontrolowane są zakłócenia o częstotliwości radiowej.

Aspirator do nosa Nosiboo Pro posiada certyfikat zgodności z normami IEC 60601-1-2:2014; EN 60611-2:2018 (badanie EMC); EN 6061-1-11:2015; EN 6061-1:2017.

10. Wpływ na środowisko

Urządzenia nie wolno wyrzucić do domowego kosza na śmieci, lecz zutylizować jako odpad elektryczny, zgodnie z lokalnymi przepisami. Zanieść go do wyznaczonego punktu odbioru.



Głowica Colibri nie stanowi zagrożenia dla środowiska, dlatego można ją wyrzucać jako odpad domowy.

11. Dane techniczne

Moc silnika: 500 W

Regulowana moc silnika: 150-390 W

Moc: 420 VA

Regulowana różnica ciśnień: 0,04-0,08 bar

Max. przepływ powietrza: 30-42 l/min

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Stopień IP: IP21

Klasa ochrony: II

Typ zastosowanych części: BF

Zastosowane części: cała obudowa

Sposób działania: nieciągłe działanie

Czas pracy: włączony 15 min/ wyłączenie po ok. 50 min

Czas ciągłego działania: max. 15 min

Czas zwolnienia wyłącznika bezpieczeństwa: po 15 minutach

Temperatura zadziałania przełącznika temperatury: 95 °C

Średnia temperatura obudowy: 30-35 °C po 1 min. ciągłego użycia

Poziom hałasu: 60-70 dB

Planowana żywotność obudowy (części elektrycznych): 3 lata

Planowana żywotność głowicy Colibri: 3 miesiące

Średnica fragmentu standardowej końcówki do nosa

przeznaczonego do nosa: max. 7,0 mm

Długość fragmentu standardowej końcówki do nosa

przeznaczonego do nosa: max. 8,0 mm

Średnica fragmentu końcówki do nosa dla noworodków

przeznaczonego do nosa: max. 4,9 mm

Długość fragmentu końcówki do nosa dla noworodków

przeznaczonego do nosa: max. 12,6 mm

Waga: 1090 g

Wymiary (obudowa, szer. x wys. x głęb.): 198 x 162 x 172 mm

Wymiary (kompletne opakowanie): 180 x 180 x 225 mm

Warunki pracy:

1. Zakres temperatury: -5 °C do +40 °C

2. Wilgotność względna: max. 75%

3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego:

525-795 mmHg / 70-106 kPa

Warunki transportu:

1. Zakres temperatury: -20 °C do +65 °C

2. Wilgotność względna: 10-75%

3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego:

150-795 mmHg / 20-106 kPa

Warunki przechowywania:

1. Zakres temperatury: -20 °C do +65 °C

2. Wilgotność względna: 10-75%

3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego:

525-795 mmHg / 70-106 kPa

MD Category: II.a

NBOG: MD1102

MDD/MDR: MDD Legacy Device

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

12. Akcesoria, części zamienne

Na terenie Unii Europejskiej części można zamówić w specjalistycznym serwisie:

ATTRACT Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Hungary

Tel.: +36 72 551 642 (pon-pt: 8:00 – 16:00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com

W przypadku krajów spoza Unii Europejskiej części dostępne są u dystrybutorów produktów Nosiboo.



EU kabel zasilający
300026



UK kabel zasilający
300054



Element łączący
300007 * niebieski
300008 * różowy
300009 * zielony
300076 * szary
300077 * szafiowy

Informacje na temat gwarancji można znaleźć pod poniższym linkiem:

<https://en.nosiboo.eu/downloads/>



Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie produktów z nieautoryzowanych źródeł importu!

Nosiboo Pro Accessory Set:

Dodatkowy zestaw części do Nosiboo Pro/Pro2. Wszystkie części zawarte w zestawie mogą być używane do obu typów urządzeń.

Jest dostępny w sklepie internetowym producenta (<https://shop.nosiboo.eu/>), na Amazonie lub u dystrybutorów produktów Nosiboo.



ACS-01-01 niebieski

- * 1 głowica Colibri
+ końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 wężyk
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka



ACS-01-04 szary

- * 1 głowica Colibri
+ końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 wężyk
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka



ACS-01-02 różowy

- * 1 głowica Colibri
+ końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 wężyk
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka



ACS-01-13 szatwiowy

- * 1 głowica Colibri
+ końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 wężyk
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka



ACS-01-03 zielony

- * 1 głowica Colibri
+ końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 wężyk
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka

Szczegółowe dane kontaktowe producenta

ATTRACT Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Hungary
Tel.: +36 72 551 642 (pn-pt: 8:00-16:00)
E-mail: contact@nosiboo.com