

PHILIPS

AVENT

SCF323



Przed pierwszym użyciem pojedynczego laktatora elektrycznego Philips Avent zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Warto zachować ją na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.philips.com/support.

Ostrzeżenie

- Użyj oryginalnego przewodu USB. To urządzenie nie zawiera zasilacza. Do zasilania produktu używaj wyłącznie certyfikowanego, bezpiecznego zasilacza niskonapięciowego (SELV) o parametrach wyjściowych 5 V $\pm$ 0,5 V, $\geq$ 1 A. Korzystanie z niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenie lub poważne obrażenia. • Pamiętaj, aby po zakończeniu korzystania z urządzenia natychmiast odłączyć go od zasilania. • Nie korzystaj z laktatora podczas kąpieli. • Nie umieszczaj ani nie przechowuj laktatora w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięty do wanny albo umywalki. • Nie wkładaj do wody lub innych cieczy silniczka laktatora, rurki silikonowej ani kabla USB. • Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie wyciągaj go. Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. • Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. • Każdorazowo przed użyciem upewnij się, że laktator nie jest uszkodzony. • Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę Philips Avent. • Zadbaj o to, by laktator nie był narażony na działanie bardzo wysokich temperatur ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Laktator nie zawiera żadnych części, które może naprawiać użytkownik. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać silniczka laktatora. • Części laktatora, które wchodzi w bezpośredni kontakt z pokarmem, są częściami do użytku osobistego i nie należy udostępniać ich innym matkom. • Nie odsuwaj laktatora od piersi, gdy jest w nim wytworzone podciśnienie. Wyłącz laktator, odczep palcem lejek od piersi i odsuń urządzenie. Można także zdjąć silikonową rurkę z części silnikowej lub nasadki, aby zniwelować podciśnienie. • Nigdy nie korzystaj z laktatora podczas ciąży, ponieważ może to wywołać poród. • Nie korzystaj z urządzenia, gdy czujesz się senna. • Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. • Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia. • Jeśli odciąganie pokarmu staje się bolesne, zaprzestań go i skonsultuj się z lekarzem lub poradnią laktacyjną. • Nie korzystaj z laktatora w obecności palnej mieszanki anestetyków i powietrza, tlenu lub podtlenu azotu. • Chociaż laktator jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej, może wykazywać niewielką czułość na nadmierną emisję i/lub może powodować zakłócenia w przypadku bardziej czułych urządzeń. • Nie należy kłaść na silniczku laktatora żadnych przedmiotów, takich jak poduszka, koc itp. Podczas użytkowania należy pilnować, aby silniczek laktatora pracował w warunkach dobrej wentylacji i odprowadzania ciepła.

Uwaga

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego. • Nigdy nie wkładaj ani nie wsuwaj innych przedmiotów w żadne otwory lub rurki. • Nie skracaj silikonowej rurki. • Przed podłączeniem laktatora do zasilania sprawdź, czy napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem podanym na zasilaczu (5 V $\pm$ 0,5 V). • Każdorazowo przed użyciem umyj, oplucz i wysterylizuj odpowiednie części laktatora. • Do mycia części laktatora nie stosuj środków do czyszczenia ani detergentów o właściwościach antybakteryjnych lub ściernych. • Nigdy nie umieszczaj części laktatora ani kabla USB w wodzie lub substancjach sterylizujących, może to bowiem doprowadzić do trwałego uszkodzenia laktatora. • Jeżeli wytwarzane podciśnienie powoduje dyskomfort lub ból, wyłącz laktator, odczep palcem lejek laktatora od piersi i odsuń go. Można także zdjąć silikonową rurkę z części silnikowej lub nasadki, aby zniwelować podciśnienie. • Jeżeli odciąganie pokarmu nie przynosi efektu, nie przedłużaj tej czynności o więcej niż pięć minut. • Nie używaj laktatora, jeśli silikonowa membrana wygląda na uszkodzoną lub pękniętą. Silikonową membranę należy wymienić. Informacje na temat sposobu zamawiania części zamiennych można znaleźć w rozdziale „Zamawianie akcesoriów”. • Dla bezpieczeństwa twojego dziecka zawsze postępuj zgodnie z opisem w instrukcji użytkowania dołączonej do butelki i smoczka.


Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.


Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips Avent, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis

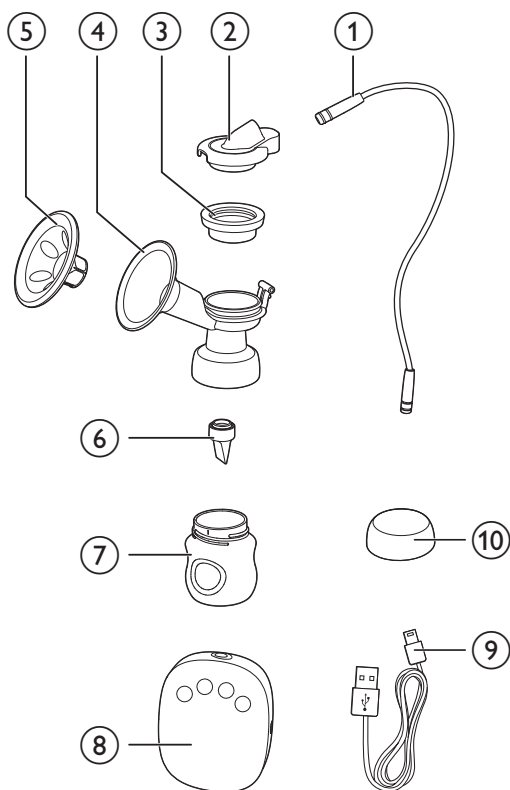

①	Silikonowa rurka	⑦	Butelka (125 ml)
②	Silikonowa nasadka	⑧	Silniczek laktatora
③	Silikonowa membrana	⑨	Przewód USB Nie ma funkcji ładowania, można używać wyłącznie za pomocą kabla zasilania. Zasilacz nie jest dołączony.
④	Część główna laktatora		
⑤	Nakładka masująca		
⑥	Zawór	⑩	Nasadka butelki

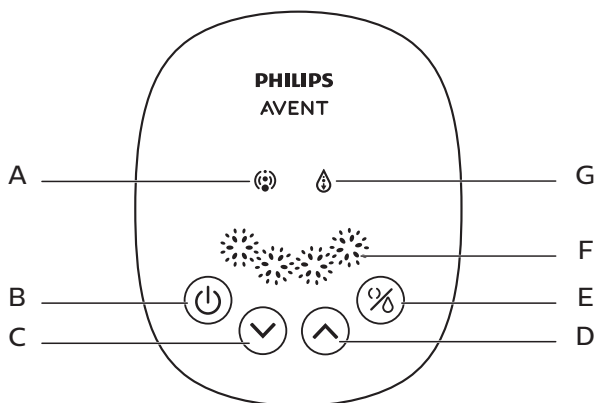

A	Wskaźnik stymulacji	E	Przycisk trybu (wybieranie trybu stymulacji lub odciągania)
B	Przycisk zasilania	F	Wskaźnik poziomu odciągania
C	Przycisk zmniejszania poziomu	G	Wskaźnik odciągania
D	Przycisk zwiększania poziomu		

Przeznaczenie

Pojedynczy laktator elektryczny Philips Avent służy do odciągania i gromadzenia pokarmu z piersi kobiety w okresie laktacji. Produkt jest przeznaczony dla jednej użytkowniczki.

Czyszczenie i sterylizacja

Każdorazowo przed użyciem laktatora należy rozmontować, umyć i wysterylizować wszystkie części, które stykają się z pokarmem. (patrz punkty ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦ w rozdziale Przegląd)

Przed pierwszym użyciem butelki i jej części oraz za każdym razem należy ją również rozmontować, umyć i wysterylizować.



Ostrzeżenie

- Nie wolno myć ani sterylizować silniczka laktatora, rurki silikonowej, nasadki i zasilacza. Wymienione elementy nie stykają się z pokarmem. Części te można przetrzeć miękką szmatką.

Butelkę i jej części można również myć w zmywarce do naczyń (wyłącznie w górnym koszu) lub ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem, po czym należy je dokładnie opłukać. Zalecamy sterylizację wszystkich części mających kontakt z mlekiem matki w naszym sterylizatorze parowym Philips Avent lub poprzez gotowanie przez 5 minut. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z naczyniem, aby chronić części przed odkształceniem.



Ostrzeżenie

- Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia zaworu i membrany silikonowej. W przypadku uszkodzenia laktator nie będzie działał prawidłowo.
- Aby wyczyścić zawór, należy delikatnie pocierać go między palcami w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy wkładać do niego żadnych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie.

Montaż


W celu zmontowania laktatora należy wykonać poniższe czynności.




Uwaga

- Czyść i sterylizuj laktator w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Poprawnie składaj laktator w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby uniknąć wycieku, przed montażem usuń pozostałości wokół obręczy. Nałóż butelkę na korpus laktatora i nie dokręcaj zbyt mocno.
- Przed wyjęciem sterylizowanych elementów należy dokładnie umyć ręce.


- 1** Włóż zawór od spodu w korpus laktatora.

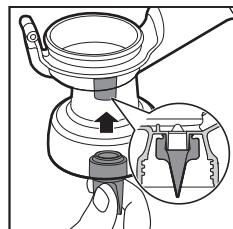


- 2** Umieść butelkę na korpusie laktatora i przekręć ją w lewo, aby ją zamocować. Nie dokręcać zbyt mocno podczas montażu butelki na korpusie urządzenia.

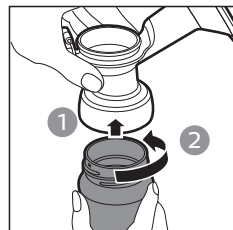

- 3** Włóż nakładkę masującą do lejka laktatora i dociśnij ją, aby zapewnić idealną szczelność.

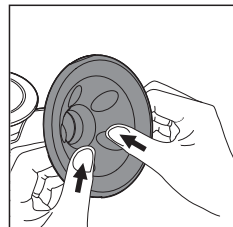

- 4 Nałóż silikonową membranę na korpus laktatora i dociśnij obręcz, aby zapewnić idealną szczelność.

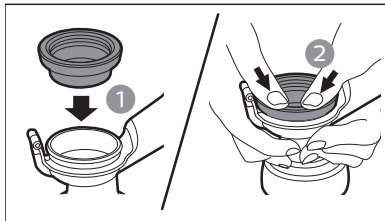


Wskazówka

- Złożenie urządzenia może być łatwiejsze, gdy jest wilgotne.

- 5 Mocno wciśnij nasadkę na silikonową membranę, aby ją pewnie na niej umieścić.



- 6 Podłącz przewód silikonowy do nasadki i silniczka.

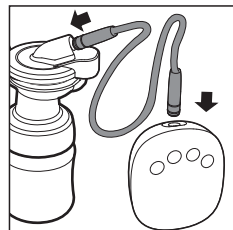


Korzystanie z laktatora

Przed rozpoczęciem korzystania z laktatora


- Umyj dokładnie ręce i upewnij się, że piersi są czyste. Delikatnie wyciśnij odrobinę mleka z każdej brodawki sutkowej, aby upewnić się, że kanały mleczne nie są zablokowane.
- Podczas czyszczenia, sterylizowania i składania laktatora postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach „Czyszczenie i sterylizacja” oraz „Składanie laktatora elektrycznego”.
- Usiądź wygodnie, pochylając się lekko do przodu (plecy podeprzyj poduszką). Pamiętaj, aby mieć w pobliżu szklankę wody.

Rozpoczęcie odciągania pokarmu

- 1 Za pomocą oryginalnego kabla USB podłącz laktator do portu USB. To urządzenie nie zawiera zasilacza. Do zasilania produktu używaj wyłącznie zasilacza o parametrach wyjściowych 5 V $\overline{\text{---}}$, ≥ 1 A. Zasilacz podłącz do gniazdka elektrycznego.

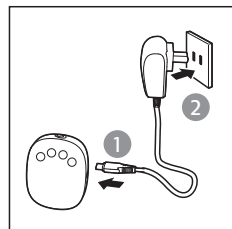


- 2 Przyciśnij zmontowane korpusy laktatora do piersi. Upewnij się, że brodawki sutkowe są wyśrodkowane, tak aby poduszka masująca tworzyła nieprzepuszczalne uszczelnienie. Dopilnuj, aby powietrze nie uchodziło; w przeciwnym razie nie wystąpi efekt zasysania.

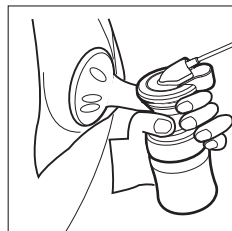


- 3 Naciśnij przycisk zasilania (⏻), aby włączyć laktator.

➤ Panel wyświetlacza zaświeci się na 1 sekundę. Laktator automatycznie uruchamia się z najniższym poziomem stymulacji. Gdy urządzenie zostanie aktywowane, poczujesz ssanie piersi. Zaświeci się wskaźnik stymulacji. Urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci, która zapamiętuje poziomy stymulacji i trybu odciągania pokarmu podczas ostatniego użycia.

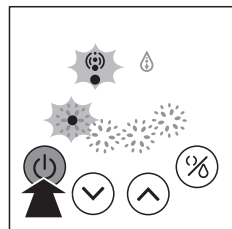

- 4 Można wybrać dowolny poziom przez naciśnięcie przycisku zwiększania (⬆) lub zmniejszania poziomu (⬇). Możesz również nacisnąć przycisk trybu (%), aby przełączyć się pomiędzy trybem stymulacji a trybem odciągania pokarmu i uzyskać najlepszy efekt.

➤ Istnieją 4 poziomy stymulacji i odciągania pokarmu. Można nacisnąć przycisk zwiększania poziomu, aby zwiększyć moc ssania. Naciśnij przycisk zmniejszania poziomu, aby zmniejszyć moc ssania. Liczba wskaźników będzie się zwiększać lub zmniejszać w zależności od wybranego poziomu.

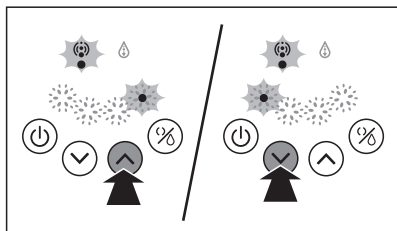

Uwaga

- Nie musisz korzystać z najwyższego poziomu odciągania pokarmu. Używaj jedynie tych poziomów, które zapewniają pełną wygodę.


- 5 Po zakończeniu odciągania pokarmu wyłącz laktator, wciskając przycisk zasilania (⏻) i ostrożnie zdejmij jego główną część.



Wskazówka

- Po wyłączeniu laktatora odczep palcem lejek od piersi i odsuń laktator.

- 6 Odcłóż wtyczkę zasilacza od gniazdka elektrycznego, a następnie odcłóż zasilacz od silniczka laktatora.

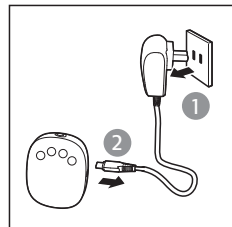

Wskazówka

- W celu ochrony urządzenia zawsze wyłączaj laktator poprzez naciśnięcie przycisku zasilania, a nie odłączenie zasilacza.

- 7 Odkręć butelki od korpusów laktatora w celu rozpoczęcia karmienia lub do przechowania. Wyczyść używane części laktatora zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale „Czyszczenie i sterylizacja”.



Ostrzeżenie

- Jeżeli przez 5 minut nie uda się w ogóle odciągnąć pokarmu, nie kontynuuj tej czynności. Spróbuj odciągnąć pokarm o innej porze dnia.
- Jeśli odciąganie pokarmu staje się bardzo niewygodne lub bolesne, przestań korzystać z laktatora i skonsultuj się z poradnią laktacyjną.
- Nigdy nie przechylaj laktatora, gdy ilość pokarmu w butelce osiągnie maksymalny poziom. Aby uniknąć rozlania, załóż nową butelkę, zanim zaczniesz ponownie odciągać pokarm.
- Po zakończeniu odciągania pokarmu natychmiast zdejmij butelkę z części głównej laktatora, a następnie przechowuj butelkę z pokrywką zamykającą.



Uwaga

- Jeśli regularnie odciągasz więcej niż 125 ml na sesję z każdej piersi, możesz użyć butelki Philips Avent o pojemności 260 ml/9 oz (należy ją zakupić oddzielnie), aby zapobiec przepełnieniu i rozlaniu.
- Podczas użytkowania urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie pracować przez ponad 30 minut.
- Umieść silniczek laktatora na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby uniknąć przypadkowych upadków podczas użytkowania. W przeciwnym razie może dojść do oderwania korpusu laktatora od piersi oraz urazu.

Przechowywanie pokarmu



Ostrzeżenie


- Nigdy nie zamrażaj ponownie pokarmu.
- Nie mieszaj świeżo odciągniętego pokarmu z już zamrożonym.
- Zawsze wylewaj resztki mleka po zakończeniu karmienia.



Uwaga

- Przechowuj wyłącznie mleko zebrane za pomocą sterylnego laktatora.

- 1 Po odciągnięciu pokarmu odkręć butelkę od korpusów laktatora.
- 2 Odciągnięty pokarm należy przechowywać w czystych i wysterylizowanych butelkach Philips Avent wyposażonych w tarcze uszczelniające. Od razu włóż je do lodówki lub zamrażarki.
 - Odciągnięty pokarm można przechowywać w lodówce przez maksymalnie 48 godzin (nie na drzwiach), a w zamrażalniku około 3 miesięcy.
 - Oznacz butelki datą i godziną.
 - W pierwszej kolejności używaj starsze mleko.

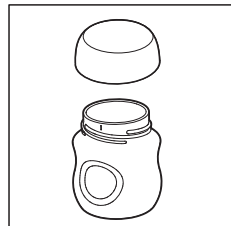

Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka

OSTRZEŻENIE!

- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Z uwagi na niebezpieczeństwo uduszenia nie przedłużać pasków ani uchwytów
- Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić.
- W przypadku korzystania z butelek Philips Avent do przechowywania pokarmu pamiętaj, aby każdorazowo przed karmieniem zdjąć pokrywkę zamykającą i założyć smoczek Philips Avent.
- Umieść zamrożony pokarm na noc w lodówce, aby się rozmroził. W wyjątkowej sytuacji możesz rozmrozić pokarm w misce gorącej wody. Rozmrożony pokarm należy wykorzystać w ciągu 24 godzin.

Podgrzewanie pokarmu

- Umieść butelkę w misce z gorącą wodą lub użyj podgrzewacza do butelek i słoiczków Philips Avent, aby bezpiecznie podgrzać pokarm.



Ostrzeżenie

- Pamiętaj! Przed karmieniem każdorazowo sprawdzaj temperaturę mleka lub jedzenia.
- Nigdy nie podgrzewaj pokarmu w kuchenie mikrofalowej, ponieważ cenne składniki odżywcze i przeciwciała mogą ulec zniszczeniu. Ponadto nierówne podgrzewanie może spowodować nadmierne podgrzanie płynu w niektórych miejscach, co może grozić oparzeniem gardła dziecka.
- Nigdy nie zanurzaj zamrożonej butelki we wrzącej wodzie, aby uniknąć jej pęknięcia.

Praktyczne wskazówki

Laktator elektryczny jest prosty i łatwy w użyciu. Przy odrobinie praktyki w krótkim czasie będziesz w stanie biegle odciągać pokarm.

- Wybierz czas, gdy się nie spieszysz i nikt Ci nie może przeszkodzić.
- Dziecko lub jego fotografia umieszczona w pobliżu może stymulować wypływ pokarmu.
- Przed rozpoczęciem odciągania pokarmu połóż na piersi ciepły ręcznik i delikatnie masuj przez kilka minut. Może to pobudzać wypływ pokarmu i pomaga zmniejszyć ból piersi.
- Ciepło i uczucie odprężenia mogą pobudzić wypływ pokarmu. Spróbuj odciągać pokarm po ciepłej kąpieli lub prysznicy.
- Spróbuj odciągać pokarm z jednej piersi, gdy drugą karmisz dziecko lub odciągaj pokarm tuż po zakończeniu karmienia.
- Od czasu do czasu warto zmienić położenie laktatora na piersi, aby pobudzić wypływ pokarmu.



Wskazówka

- Próbuje tak długo, aż wypracujesz najodpowiedniejszą dla siebie technikę pompowania. Jeśli odciąganie pokarmu staje się bolesne, zaprzestań go i skonsultuj się z poradnią laktacyjną.

Kiedy można odciągać pokarm

Najlepiej używać laktatora po zakończeniu regularnego karmienia piersią, chyba że zasugeruje to lekarz lub poradnia laktacyjna. Wyjątki to:

- Odciąganie pokarmu dla dziecka w szpitalu.
- Jeśli masz podrażnione lub popękane brodawki sutkowe, gdy chcesz odciągać pokarm do czasu ich zagojenia.
- Kiedy tymczasowo nie jesteś z dzieckiem, a chcesz kontynuować karmienie piersią po ponownym odzyskaniu kontaktu. Należy regularnie odciągać pokarm, aby stymulować wypływ mleka.

Właściwe pory dnia na odciąganie pokarmu

- Wczesnie rano, gdy piersi są pełne, tuż przed lub po pierwszym karmieniu dziecka.
- Po karmieniu, jeśli dziecko nie opróżniło obu piersi.
- Pomiędzy karmieniami lub w przerwie, jeśli wróciłaś do pracy.

Przechowywanie

- Przechowuj laktator w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie może dojść do przebarwienia produktu.
- Przechowuj laktator oraz akcesoria do niego w bezpiecznym i suchym miejscu.

Zgodność

Laktator elektryczny Philips Avent jest zgodny z butelkami Philips Avent z naszej oferty. W przypadku korzystania z innych butelek Philips Avent należy używać tego samego typu smoczka, który był dostarczony z daną butelką. Szczegóły dotyczące montażu smoczka oraz ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia znajdują się w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej: www.philips.com/support.

Zamawianie akcesoriów

Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy pod adresem www.shop.philips.com/support. Jeśli sklep internetowy nie jest dostępny w danym kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku problemów z zakupieniem akcesoriów do urządzenia skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.

Recykling

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju lub z poradnią laktacyjną.

Problem	Rozwiązanie
Brak ssania.	- Sprawdź, czy wszystkie elementy laktatora zostały prawidłowo złożone oraz czy zawór jest właściwie zamocowany. - Upewnij się, że nasadka, membrana i nakładka masująca są dobrze przymocowane do laktatora i dokładnie do niego przylegają. - Jeśli ciśnienie powietrza w danym regionie jest zbyt niskie, może to mieć wpływ na ssanie. - Upewnij się, że silikonowa rurka jest dobrze połączona z nasadką i silniczkiem bez skręcania.
Pokarm nie jest odciągany.	- Upewnij się, że laktator jest prawidłowo założony i używany. - Zrelaksuj się i spróbuj ponownie, ponieważ praktyka może poprawić umiejętności odciągania. - Zapoznaj się z częścią „Praktyczne wskazówki”.
Ból piersi podczas odciągania pokarmu.	- Możesz używać laktatora ze zbyt wysokim poziomem ssania. Nie musisz korzystać z wszystkich poziomów ssania. Używaj jedynie tych, które zapewniają pełną wygodę. - Naciśnij przycisk zmniejszania poziomu, aby zmniejszyć moc ssania. - Skonsultuj się z lekarzem lub poradnią laktacyjną.
Pokarm wypływa z nakładki masującej.	- Zdejmij i załóż nakładkę masującą, aby zapewnić dokładne dopasowanie. Upewnij się, że jest poprawnie i pewnie założona. - Spróbuj lekko pochylić się do przodu.
Pęknięcia/odbarwienia.	- Należy unikać kontaktu z detergentami/środkami czyszczącymi o właściwościach antybakteryjnych lub ściernych. Połączenie detergentów, środków czyszczących, roztworów sterylizujących, zmiękczonej wody i wahań temperatury może powodować pękanie plastiku. W przypadku stwierdzenia pęknięcia natychmiast przetrwaj używanie produktu. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Philips Avent, aby uzyskać części zamienne. - Barwniki spożywcze mogą spowodować odbarwienie elementów, ale nie wpłynie to na ich użytkowanie. - Wszystkie elementy należy trzymać z dala od źródła ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ mogą one spowodować ich odbarwienie.
Komponenty są uszkodzone lub zostały zagubione.	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Philips Avent, aby uzyskać części zamienne. Dane kontaktowe można znaleźć w karcie gwarancyjnej.
Laktator nie działa.	- Upewnij się, że laktator jest prawidłowo zamontowany, i naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. - Upewnij się, że napięcie wyjściowe używanego zasilacza wynosi 5 V $\pm$ 0,5 V, a prąd wyjściowy co najmniej 1 A.
Wyświetlacz miga trzykrotnie, a następnie wyłącza się automatycznie.	- Gdy korzystasz z zasilacza, upewnij się, że napięcie wyjściowe wynosi 5 V $\pm$ 0,5 V, a prąd wyjściowy co najmniej 1 A. Upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony, a następnie ponownie włącz laktator. - Po sprawdzeniu powyższego scenariusza, jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w celu uzyskania pomocy.
Złącze silikonowej rurki jest zbyt luźne, gdy jest podłączone do silniczka laktatora lub nakładki silikonowej.	Wymień złącze silikonowej rurki na nowe.
Kontrolka na panelu sterowania jest zawsze włączona.	- Oznacza to, że napięcie wejściowe zasilacza jest zbyt wysokie. - Upewnij się, że używasz oryginalnego przewodu USB, napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 5 V $\pm$ 0,5 V, a prąd wyjściowy co najmniej 1 A.
Kontrolka na panelu sterowania miga cyklicznie.	- Oznacza to, że napięcie wejściowe używanego zasilacza jest zbyt niskie lub prąd znamionowy zasilacza jest zbyt mały i urządzenie nie może się normalnie uruchomić. - Upewnij się, że używasz oryginalnego przewodu USB, napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 5 V $\pm$ 0,5 V, a prąd wyjściowy co najmniej 1 A.

Ważne informacje

W poniższej tabeli opisano kilka typowych objawów związanych z karmieniem piersią. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub z poradnią laktacyjną.

Problem	Opis
Uczucie bólu	Odczuwalny ból piersi lub brodawki sutkowej.
Podrażnienie brodawek sutkowych	Utrzymujący się ból brodawek sutkowych na początku okresu odciągania pokarmu lub trwający przez cały okres odciągania pokarmu albo ból między sesjami, bardzo podobny do bólu odczuwanego podczas karmienia piersią.
Obrzmienie	- Obrzęk piersi. Pierś może wydawać się twarda, grudkowata i wrażliwa. - Może obejmować rumień (zaczerwienienie) okolicy piersi i gorączkę.
Siniaki/zakrzepy	Czerwono-purpurowe przebarwienie, które nie blednie po naciśnięciu. Gdy siniak zblednie, staje się zielony i brązowy.
Pęcherze	Wyglądają jak małe pęcherzyki na powierzchni skóry.
Uraz tkanki brodawki sutkowej	- Pęknięte lub popękane brodawki sutkowe. - Skóra tkanki brodawki sutkowej odpada. Zwykle dzieje się to w połączeniu z popękaniem brodawek i/lub pęcherzami. - Rozdarte brodawki sutkowe.
Krwawienie	Pęknięte lub rozdarte brodawki sutkowe mogą skutkować krwawieniem dotkniętego miejsca.
Zablokowane przewody sutkowe	Na piersi pojawił się czerwony, delikatny guzek. Może obejmować rumień (zaczerwienienie) okolicy piersi i gorączkę. Bez leczenia może to spowodować zapalenie sutka (zapalenie piersi).

Objaśnienie symboli

Znaki i symbole ostrzegawcze mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania bezpiecznego i prawidłowego użytkowania oraz dla ochrony użytkownika i innych osób przed urazami.

Ten symbol oznacza:

- że produkt nie może być wyrzucany jako odpad nieposortowany, ale musi zostać przekazany do punktu selektywnej zbiórki w celu odzysku i recyklingu (rys. 1);
- nakaz postępowania zgodnie z instrukcją obsługi (rys. 2);
- ważne informacje, takie jak ostrzeżenia i przestrogi (rys. 3);
- producenta (rys. 4);
- numer katalogowy laktatora nadany przez producenta (rys. 5);
- numer partii laktatora (rys. 6);
- prąd stały (rys. 7);
- urządzenie klasy III (rys. 8);
- granice temperatur, w których dane urządzenie może być bezpiecznie przechowywane i transportowane: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F) (rys. 9);
- 2-letnią ogólnowiatową gwarancję firmy Philips (rys. 10);
- do kontaktu z żywnością (rys. 11);
- że opakowanie jest wykonane z tektury falistej (rys. 12);
- że producent podjął wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w zakresie dystrybucji na terenie Unii Europejskiej (rys. 13).